

ASZPARAGIN LEVES SZELEKTÍV KIEGÉSZÍTŐ

500 ml Aszparagin leves készítéséhez

Liofilizált keverék *Pseudomonas* spp. izolálásához.

Alapadatok	
Katalógusszám:	4 ml: ASB80004
Szín:	Fehér
Megjelenés:	Homogén liofilizátum

Felhasználási útmutató: Oldjunk fel **5,5 g Aszparagin leves alapot (ASB20500)** 500 ml ionmentes vízben. Adjunk hozzá **4 ml Glicerín kiegészítőt (GLC80100)**. Gondosan keverjük meg. Az elegyet az oldódás elősegítése érdekében gyengén melegíthetjük. Fejtsük szét, majd sterilizáljuk autoklávban 121 °C-on, 15 percig. Hűtsük le 50 °C-ra és aseptikusan adjuk hozzá **1 fiola Asparagin leves szelektív kiegészítő (ASB80004)** 4 ml steril ionmentes vízben feloldott tartalmát. Kiöntés előtt gondosan keverjük meg.

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL [mg/fiola]

Antibiotikum keverék	5
----------------------	---

Tárolási körülmények: A fiolákat fénytől védve 2 – 8 °C-on tároljuk.

FIGYELEM:

A táptalajokat csak a címkén jelölt lejárati időig szabad felhasználni!

In vitro diagnosztikum – csak professzionális felhasználásra!