

BORDETELLA SZELEKTÍV KIEGÉSZÍTŐ

500 ml Bordetella agar készítéséhez

Liofilizált keverék *Bordetella* spp. izolálásához.

Alapadatok	
Katalógusszám:	4 ml: BSS80004
Szín:	Fehér
Megjelenés:	Homogén liofilizátum

Felhasználási útmutató: Oldjunk fel **26 g Aktív szenes agar alapot (CHA20500)** 450 ml ionmentes vízben. Az elegyet állandó keverés mellett forraljuk fel. Sterilizálás autoklávban 121°C-on 15 percig. Hűtsük le 50 °C-ra és aszeptikusan adjunk hozzá **50 ml steril defibrinált vért** és **1 fiola Bordetella szelektív kiegészítő (BSS80004)** 4 ml steril ionmentes vízben feloldott tartalmát. Kiöntés előtt gondosan keverjük meg.

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL [mg/fiola]

Cefalexin	20
-----------	----

Tárolási körülmények: A fiolákat fénytől védve 2 – 8 °C-on tároljuk.

FIGYELEM:

A táptalajokat csak a címkén jelölt lejáratiig szabad felhasználni!

In vitro diagnosztikum – csak professzionális felhasználásra!