

BRILLANTZÖLD OLDAT, STERIL

Steril brillantzöld oldat *Salmonella* spp. (ideértve a *S. typhi*-t is) izolálásához klinikai mintákból.

Alapadatok	
Katalógusszám:	30 ml: BGS80030-1D
Szín:	Sötétzöld
Megjelenés:	Transzparens, üledékmentes oldat

Felhasználási útmutató: Oldjunk fel **21,5 g Brillantzöld agar alap, humán (BGH20500)** port 500 ml ionmentes vízben. Az elegyet állandó keverés mellett forraljuk fel. Sterilizálás autoklávbán 121 °C-on, 15 percig. Hűtsük le 50 °C-ra és aseptikusan adjunk hozzá **10 csepp (0,5 ml) Brillantzöld oldat, steril (BGS80030-1D) kiegészítőt**. Kiöntés előtt gondosan keverjük meg.

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL

Brillantzöld	0,1 %
Oldószer	Steril desztillált víz

Tárolási körülmények: A palackokat fénytől védve 2 – 8 °C-on tároljuk.

FIGYELEM:

A kiegészítőt csak a címkén jelölt lejárati időig szabad felhasználni!

In vitro diagnosztikum – csak professzionális felhasználásra!