

BRUCELLA SZELEKTÍV KIEGÉSZÍTŐ

500 ml Brucella agar készítéséhez

Liofilizált keverék Brucella fajok izolálásához.

Alapadatok	
Katalógusszám:	4 ml: BAS80004
Szín:	Fehér
Megjelenés:	Homogén liofilizátum

Felhasználási útmutató: Oldjunk fel **22,5 g Brucella agar alapot (BAB20500)** 460 ml ionmentes vízben. Az elegyet állandó keverés mellett forraljuk fel. Sterilizálás autoklávbán 121 °C-on, 15 percig. Hűtsük le 50 °C-ra. Szuszpendáljuk fel **1 fiola Brucella szelektív kiegészítő (BAS80004)** tartalmát 4 ml etanol/steril ionmentes víz 1:1 arányú keverékében. Inkubáljuk 15 percig 37 °C-on. Alaposan rázzuk fel, majd haladéktalanul adjuk a táptalajhoz **35 ml steril inaktivált (56 °C-on 30 percig hőkezelt) lószérummal** együtt. Kiöntés előtt gondosan keverjük meg.

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL [mg/fiola]

Bacitracin	250,0
Cycloheximide	50,0
Nystatin	11,0
Vancomycin	10,0
Nalidixsav	2,5
Polymyxin B	0,4

Tárolási körülmények: A fiolákat fénytől védve 2 – 8 °C-on tároljuk.

FIGYELEM:

A táptalajokat csak a címkén jelölt lejárati időig szabad felhasználni!

In vitro diagnosztikum – csak professzionális felhasználásra!