

CAMPYLOBACTER NÖVEKEDÉSI KIEGÉSZÍTŐ

500 ml Campylobacter agar készítéséhez

Liofilizált keverék Campylobacter fajok növekedésének elősegítéséhez.

Alapadatok	
Katalógusszám:	4 ml: CGS80004
Szín:	Zöldes
Megjelenés:	Homogén liofilizátum

Felhasználási útmutató: Oldjunk fel **19 g Campylobacter agar alap portáptalajt (CAA20500)** 470 ml ionmentes vízben. Az elegyet állandó keverés mellett forraljuk fel. Sterilizálás autoklávban 121 °C-on 15 percig. Hűtsük le 50 °C-ra és aseptikusan adjunk hozzá **25 ml lizált lóvért**, valamint egy flola **Campylobacter növekedési kiegészítő (CGS80004)** 4 ml steril desztillált vízzel feloldott tartalmát. Kiöntés előtt gondosan keverjük meg.

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL [mg/flola]

Nátrium-piruvát	125
Nátrium-metabiszulfít	125
Vas(II)-szulfát	125

Tárolási körülmények: A flóákat fénytől védve 2 – 8 °C-on tároljuk.

FIGYELEM:

A táptalajokat csak a címkén jelölt lejáratiig szabad felhasználni!

In vitro diagnosztikum – csak professzionális felhasználásra!