

CLOSTRIDIUM SZELEKTÍV KIEGÉSZÍTŐ

500 ml *Clostridium difficile* agar vagy
500 ml *Clostridium difficile* (CCFA) agar készítéséhez

Liofilizált keverék *Clostridium difficile* izolálásához.

Alapadatok	
Katalógusszám:	4 ml: CDS80004
Szín:	Fehér
Megjelenés:	Homogén liofilizátum

Felhasználási útmutató:

Véres agar készítése: Oldjunk fel **34,5 g *Clostridium difficile* agar alap (CDA20500) portáptalajt** 460 ml ionmentes vízben. Az elegyet állandó keverés mellett forraljuk fel. Sterilizálás autoklávban 121 °C-on, 15 percig. Hűtsük le 50 °C-ra és aseptikusan adjunk hozzá **35 ml steril defibrinált vért**, valamint **1 fioła *Clostridium* szelektív kiegészítő (CDS80004)** 4 ml steril ionmentes vízben feloldott tartalmát. Kiöntés előtt gondosan keverjük meg.

Vérmentes agar készítése: Oldjunk fel **34,5 g *Clostridium difficile* (CCFA) agar alap (CCF20500) portáptalajt** 500 ml ionmentes vízben. Az elegyet állandó keverés mellett forraljuk fel. Sterilizálás autoklávban 121 °C-on, 15 percig. Hűtsük le 50 °C-ra és aseptikusan adjuk hozzá **1 fioła *Clostridium* szelektív kiegészítő (CDS80004)** 4 ml steril ionmentes vízben feloldott tartalmát. Kiöntés előtt gondosan keverjük meg.

Figyelem: Számos *Clostridium* törzs érzékenysége miatt a kiegészítő cycloserin és cefoxitin tartalma csökkentett. A szelektivitás csökkenése ellensúlyozható a minta alkohollal történő előzetes kezelésével.

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL [mg/vial]

D-Cycloserine	125
Cefoxitin	4

Tárolási körülmények: A fiolákat fénytől védve 2 – 8 °C-on tároljuk.

FIGYELEM:

A táptalajokat csak a címkén jelölt lejáratiig szabad felhasználni!

In vitro diagnosztikum – csak professzionális felhasználásra!