

CHROMAgar CANDIDA

Szelektív, differenciáló, kromogén táptalaj *Candida* spp. közvetlen kimutatásához, differenciálásához és előzetes tájékoztató elkülönítéséhez.

Petri-csészébe kiszerelt ready to use táptalajok:	
Termék kód:	55 mm: CAN50055-CH, 90 mm: CAN50090-CH
Szín:	Fehér
pH (25 °C-on):	6,0 – 6,2

Felhasználási útmutató: A Petri-csészébe kiszerelt táptalajok felhasználásra készek.

ÖSSZETÉTEL [g/l]

Nutrient keverék (peptonok, kivonatok)	10,2
Kromogén keverék	22,0
Chloramphenicol	0,5
Agar	15,0

Tárolási körülmények: A lemeztáptalajokat fénytől védve 2-8 °C-on tároljuk.

FIGYELEM!

A táptalajokat csak a címkén jelölt lejárati időig szabad felhasználni!

Mikrobiológiai ellenőrzés:

Feldolgozási körülmények:			
Inkubációs hőmérséklet:	37 °C	Inkubációs idő:	48 h
Teszt törzsek		Növekedés	
<i>Candida albicans</i>	ATCC 60193	Jó, zöld telepek	
<i>Candida krusei</i>	ATCC 14243	Jó, rózsaszín telepek	
<i>Candida tropicalis</i>	ATCC 1369	Jó, kék telepek	
<i>Candida glabrata</i>	ATCC 2001	Jó, mályvaszínű telepek	
<i>Escherichia coli</i>	ATCC 25922	Gátolt	

Irodalom: www.chromagar.com

In vitro diagnosztikum – csak professzionális felhasználásra!