

CLED AGAR, ANDRADE INDIKÁTORRAL

Differenciáló táptalaj mikroorganizmusok izolálásához és telepszámlálásához vizelet mintákból. A dupla indikátor segíti a telepek megkülönböztetését.

Portáptalajok	
Katalógusszám:	500 g: CLD20500, 5 kg: CLD25000
Szín:	Bézs
Megjelenés:	Homogén, nedvszívó por
pH autoklávozás előtt (25 °C-on):	7,1 – 7,5

Felhasználási útmutató: Oldjunk fel **37 g** port 1 liter ionmentes vízben. Az elegyet állandó keverés mellett forraljuk fel. Sterilizálás autoklávbán 121 °C-on, 15 percig.

Kész táptalajok	
Palackos táptalajok:	100 ml: CLD30100, 500 ml: CLD30500
Petri-csészés táptalajok:	55 mm: CLD50055, 90 mm: CLD50090
Szín:	Türkizzöld
pH (25 °C-on):	7,2 - 7,4

Felhasználási útmutató: A palackos táptalajokat vízfürdőn vagy áramló gőzben felolvasztjuk (**FIGYELEM:** A táptalaj újra autoklávozása szükségtelen és károsító!), majd sterilen szétfejtjük. A Petri-csészébe kiszerelt táptalajok felhasználásra készek.

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL [g/l]

Peptonok	11,900
L-Cisztin	0,128
Laktóz	10,000
Andrade indikátor	0,100
Brómtimolkék	0,020
Agar	15,000

Tárolási körülmények: A portáptalajokat száraz helyen, szobahőmérsékleten, a palackos táptalajokat fénytől védve, szobahőmérsékleten, a kiöntött lemezeket fénytől védve, 2-8 °C-on tároljuk. Anyagkivételt követően a portáptalajos flakont haladéktalanul gondosan zárjuk vissza!

FIGYELEM:

A táptalajokat csak a címkén jelölt lejárati időig szabad felhasználni!

Mikrobiológiai ellenőrzés:

Feldolgozási körülmények:			
Inkubációs hőmérséklet:	37 °C	Inkubációs idő:	24 h
Teszt törzsek		Növekedés	
<i>Escherichia coli</i>	ATCC 25922	Jó, vörös telepek	
<i>Proteus mirabilis</i>	ATCC 29906	Jó, kék telepek rajzás nélkül	
<i>Enterococcus faecalis</i>	ATCC 29212	Jó, kis vörös telepek	

Irodalom: Bevis (1968) J. Med. Lab. Tech. 25: 38.

In vitro diagnosztikum – csak professzionális felhasználásra!