

CM LEVES, AEROB

Nagy tenyésztőképességű, általános aerob dúsító táptalaj.

Kész táptalajok	
Csöves táptalajok:	CMA40010: 1,5 – 2,0 cm húsmorzsa + 6 ml leves 150 x 15 mm-es (18 ml-es) csőben
	CMA40005: 1,0 – 1,5 cm húsmorzsa + 4 ml leves 100 x 15 mm-es (10 ml-es) csőben
Szín:	Sárgás (leves) + barna (hús)
pH (25 °C-on):	7,0 – 7,2

Felhasználási útmutató: A táptalajok felhasználásra készek.

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL [g/l]

Színhús	400,00
Peptonok	35,00
Glükóz	5,00
Nátrium-klorid	3,30
L-Cisztein	0,40
Növekedési faktorok	0,01
Pufferek	5,00

Tárolási körülmények: A csöveket fénytől védve 2 - 8 °C-on tároljuk.

FIGYELEM:

A táptalajokat csak a címkén jelölt lejárati időig szabad felhasználni!

Mikrobiológiai ellenőrzés:

Feldolgozási körülmények:			
Inkubációs hőmérséklet:	37 °C	Inkubációs idő:	24 h
Teszt törzsek		Növekedés	
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619		Jó	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 29213		Jó	

Irodalom: Lányi (1980) Járványügyi és Klinikai Bakteriológia

In vitro diagnosztikum – csak professzionális felhasználásra!