

COLUMBIA VÉRES AGAR

Általános felhasználású nem szelektív táptalaj normál és igényes mikro-organizmusok tenyésztéséhez. A termék butyók nélküli Petri-csészébe kerül kiszerezésre, melyet a kódszámban a CA mellékkód jelez.

Katalógus szám:	COL50090-CA
Szín:	Rubin piros
pH (25 °C-on):	7,2 – 7,4

Felhasználási útmutató: A Petri-csészébe kiszerezelt táptalajok felhasználásra készek.

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL [g/l]

Nutrient keverék (peptonok, kivonatok)	23
Keményítő, vízoldható	1
Nátrium-klorid	5
Agar	13

Tárolási körülmények: A Petri-csészébe kiszerezelt táptalajokat fénytől védve, 2-8 °C-on tároljuk.

Mikrobiológiai ellenőrzés:

Feldolgozási körülmények:			
Inkubációs hőmérséklet:	37 °C	Inkubációs idő:	24 h
Teszt törzsek		Növekedés	
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619		Jó, alfa hemolízis	
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615		Jó, béta hemolízis	
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212		Jó, hemolízis nélkül	

Irodalom: Ellner és társai (1966) Am. J. Clin. Pathol. 45: 502.

In vitro diagnosztikum – csak professzionális felhasználásra!