

PIKE LEVES

Szelektív táptalaj enterococcusok tenyésztéséhez.

Portáptalajok	
Katalógusszám:	500 g: PBB20500, 5 kg: PBB25000
Szín:	Bézs
Megjelenés:	Homogén, nedvszívó por
pH autoklávozás előtt (25 °C-on):	7,2 – 7,6

Felhasználási útmutató: Oldjunk fel **31 g** port 1 liter ionmentes vízben. Az elegyet az oldódás elősegítése érdekében gyengén melegíthetjük. Fejtsük szét, majd sterilizáljuk autoklávbán 115 °C-on, 15 percig.

FIGYELEM!

A táptalaj hőérzékeny!
Minden további hőkezelés szükségtelen és károsító!

Kész táptalajok	
Palackos táptalajok:	100 ml: PBB30100, 500 ml: PBB30500
Csőves táptalajok:	150 x 15 mm: PBB40010 (10 ml)
Szín:	Lilás
pH (25 °C-on):	7,3 – 7,5

Felhasználási útmutató: A palackos táptalajokat sterilen szétfejtjük. A csöves kiszerezésű táptalajok felhasználásra készek.

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL [g/l]

Peptonok	30,700
Glükóz	0,200
Nátrium-azid	0,065
Kristályibolya	0,002

Tárolási körülmények: A portáptalajokat száraz helyen, szobahőmérsékleten, a palackos és csöves táptalajokat fénytől védve, szobahőmérsékleten tároljuk. Anyagkivételt követően a portáptalajos flakont haldéktalanul gondosan zárjuk vissza!

FIGYELEM:

A táptalajokat csak a címkén jelölt lejárati időig szabad felhasználni!

Mikrobiológiai ellenőrzés:

Feldolgozási körülmények:			
Inkubációs hőmérséklet:	37 °C	Inkubációs idő:	24 h
Teszt törzsek		Növekedés	
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212		Jó	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922		Gátolt	

Irodalom: Pike (1944) Proc. Soc. Exp. Biol. and Med. 57: 187.

In vitro diagnosztikum – csak professzionális felhasználásra!