

RODANID LEVES

Szelektív táptalaj *Staphylococcus* spp. dúsításához.

Termék:	
Kiszerelés:	150 x 15 mm: ROE40010 (10 ml)
Szín:	Sárgás
pH (25 °C-on):	7,2 - 7,4

Felhasználási útmutató: A táptalaj felhasználásra kész.

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL

Peptonok	10
Glükóz	5
Nátrium-klorid	5
Kálium-tiocianát	40

Tárolási körülmények: A csöveket 2-8 °C-on fénytől védve tároljuk.

FIGYELEM:

A táptalajokat csak a címkén jelölt lejáratiig szabad felhasználni!

Mikrobiológiai ellenőrzés:

Feldolgozási körülmények:			
Inkubációs hőmérséklet:	37 °C	Inkubációs idő:	24 h
Teszt törzsek		Növekedés	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 29213		Jó	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922		Gátolt	

Irodalom: Lányi (1980) Járványügyi és klinikai bakteriológia

In vitro diagnosztikum – csak professzionális felhasználásra!