

SÓS LEVES

Differenciál táptalaj a baktériumok megkülönböztetésére a sótolerancia alapján.

Portáptalajok	
Katalógusszám:	500 g: SBR20500, 5 kg: SBR25000
Szín:	Sárga
Megjelenés:	Homogén, nedvszívó por
pH autoklávozás előtt (25 °C-on):	7,0 – 7,4

Felhasználási útmutató: Oldjunk fel **85 g** port 1 liter ionmentes vízben. Az elegyet az oldódás elősegítése érdekében gyengén melegíthetjük. Fejtsük szét, majd sterilizáljuk autoklávbán 121 °C-on, 15 percig.

Kész táptalajok	
Palackos táptalajok:	100 ml: SBR30100, 500 ml: SBR30500
Csöves táptalajok:	100 x 12 mm: SBR40003 (3 ml)
	150 x 15 mm: SBR40010 (10 ml)
Szín:	Víziszta
pH (25 °C):	7,1 – 7,3

Felhasználási útmutató: A palackos táptalajokat sterilen szétfejtjük. A csöves kiszerelésű táptalajok felhasználásra készek.

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL [g/l]

Peptonok	20
Nátrium-klorid	65

Tárolási körülmények: A portáptalajokat száraz helyen, szobahőmérsékleten, a palackos és csöves táptalajokat fénytől védve, szobahőmérsékleten tároljuk. Anyagkivételt követően a portáptalajos flakont haldéktalanul, gondosan zárjuk vissza!

FIGYELEM:

A táptalajokat csak a címkén jelölt lejárati időig szabad felhasználni!

Mikrobiológiai ellenőrzés:

Feldolgozási körülmények:			
Inkubációs hőmérséklet:	37 °C	Inkubációs idő:	24 h
Teszt törzsek		Növekedés	
<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 29213	Pozitív, zavarosodás	
<i>Escherichia coli</i>	ATCC 25922	Negatív, nincs növekedés	

In vitro diagnosztikum – csak professzionális felhasználásra!